



Prendas Protectoras Veterinarias

Peto Protector para Hembra cubre pecho y abdomen

Cubre y protege:

- Vendajes
- Apósitos
- Vías intravenosas
- Férulas
- Puntos de sutura
- Drenajes
- Pomadas
- Picaduras...



¿Por qué usar las Prendas Protectoras Veterinarias PPV?

Las Prendas Protectoras Veterinarias PPV son protecciones de alta calidad pensadas para la comodidad e higiene de los animales, por eso se componen de:

- Tejido técnico de última generación, elástico, antibacteriano, que deja salir la humedad, controla el olor y protege de los rayos UV.
- Hebillas o pasadores metálicos para evitar que sean mordidos.
- Correas para graduar la fijaciones situadas en lugares estratégicos para evitar que las prendas se muevan.
- Velcros flexibles y suaves para que no rocen.
- Todas la correas y el textil puede abrirse completamente para facilitar la colocación en cualquier caso veterinario.
- Su diseño patentado está pensado para que la mascota no pueda introducir el hocico por dentro de la prenda impidiendo el acceso a la zona afectada.

www.prendasveterinarias.com

ppv@prendasveterinarias.com

Gracias por adquirir este producto. Con su compra, ha optado por un artículo de gran calidad y comodidad para su mascota que le ayudará en su recuperación.


Mantener las lesiones limpias puede ser muy difícil con mascotas que se hurgan, se tumban en el suelo o se rozan con cualquier superficie.

Las prendas PPT ayudan a que no se ensucien los apósitos y zonas a proteger.

Las prendas están confeccionadas con un textil técnico de nueva generación con las siguientes cualidades:

- **Propiedades antibacterianas** (limita la proliferación de bacterias) debido a su contenido de iones de plata en la composición de sus fibras.
- **Previene malos olores.**
- **Secado rápido.**
- **Ofrecen protección UV.**

Antes de utilizar la prenda, lea todas las indicaciones de uso y seguridad.

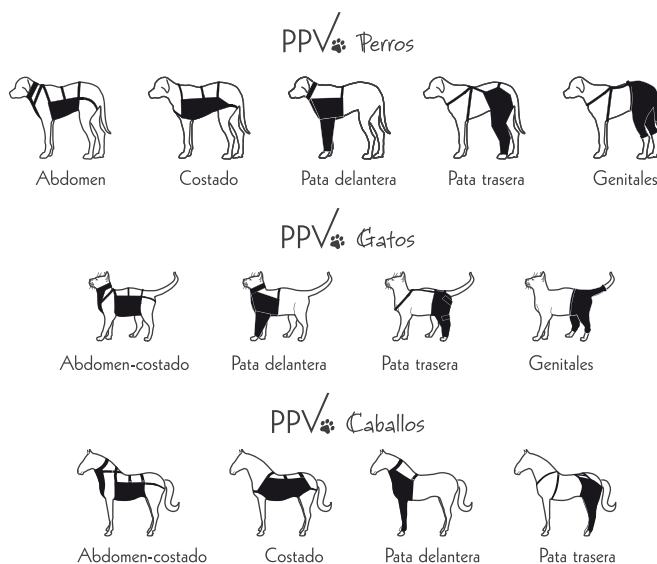


Uso correcto:

- 1.- Las Prendas Protectoras Veterinarias están destinadas a cubrir y proteger la zona que su mascota tenga dañada, de forma que no le permita acceder a ella para lamer, morder o arrancar puntos, vendajes, apósitos, vías, drenajes, cremas, etc. además de evitar que estas zonas se ensucien.
- 2.- Pueden estar en contacto directo con algunas lesiones, consulte a su veterinario en qué casos.
- 3.- Las prendas no curan por sí mismas, es necesario seguir las recomendaciones de su veterinario en cuanto a la cura de las lesiones.
- 4.- Antes de colocar la prenda calme y relaje a su mascota para una mejor experiencia por parte del animal, tenga en cuenta que cuando los animales heridos están incómodos, inquietos y estresados. Puede acariciarla, dejar que huelga la prenda...
- 5.- Tras seguir las instrucciones de colocación y comprobar que la prenda esté bien sujeta, es conveniente vigilar a la mascota hasta que se acostumbre a ella. Puede acariciarla, distraerla o darle su comida favorita según las recomendaciones de su veterinario.

- 6.- No apriete en exceso las sujeciones. Si éstas quedan demasiado justas es posible que necesite una talla más grande. Si lo desea pónganse en contacto con nosotros y le ayudaremos en la mayor brevedad.
- 7.- Es normal que la mascota lama la tela de vez en cuando según el tipo de lesiones que se estén protegiendo. Consulte a su veterinario si observa que se lame demasiado o su comportamiento se vuelve obsesivo.
- 8.- Las prendas PPV son lavables a máquina a 40°, no obstante pueden desteñir. Lávelas preferiblemente solas (debido al pelo del animal que se haya podido adherir con el uso) o con prendas oscuras o del mismo tono.
- 9.- Si las lava a máquina cierre los velcros sobre sí mismos para conservar más tiempo la integridad la prenda.
- 10.- Para que los velcros no pierdan su adherencia puede quitar los pelos que se le hayan podido enredar con cinta adhesiva para que se peguen a su superficie.



Instrucciones de colocación:

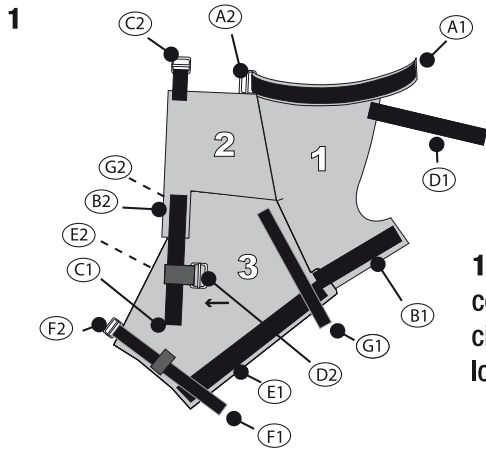


1.- Abra completamente los cierres y despegue los velcros.

2.- Es recomendable que el animal esté de pie y que para que permanezca inmóvil. Puede agarrarlo con las piernas sujetándolo por las caderas para que tenga sus manos libres o tumbado sobre su regazo.




3.- Si coloca la prenda por primera vez es posible que le resulte más fácil pasar las cintas por los pasadores de la forma en que se muestra en el dibujo "a" y "b" y cuando ya haya colocado la prenda por completo puede cerrarlas como muestra el dibujo "c" para maximizar la sujeción.

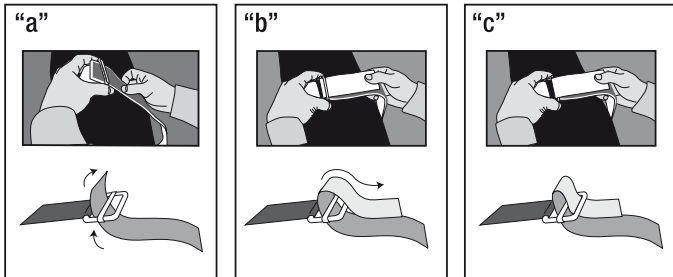


4.- Coloque primero la parte del cuello uniendo alrededor de éste el extremo A1 con la hebilla A2.




5.- La pieza 1 debe quedar sobre el pecho y la 2 sobre el costado. Pase la pieza 1 que se sitúa sobre el pecho entre las patas y a continuación coja B2 (de la pieza 2) y por detrás de la pata una mediante el velcro B1 con B2.

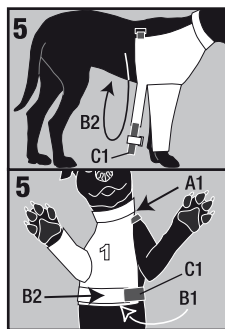


6.- Coja el extremo C1 que se encuentra en la pieza 2 y rodee el torax hasta unirla con la hebilla C2.

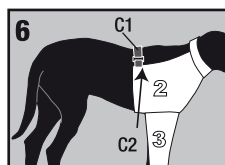


7.- Una D1 que sale de la pieza 1 con la hebilla D2 que se encuentra en la pieza 2.

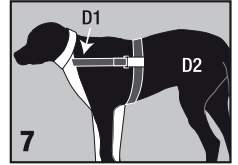

8.- Colocación de la manga de la prenda (pieza 3): para ello lo primero es rodear la pata con la pieza y unir los extremos E1 y E2 mediante el velcro situado por toda su longitud.

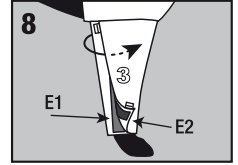

9.- Por último ajuste las sujeciones rodeando la muñeca (F1 y F2) y por debajo de la axila (G1 con G2). Estos últimos ajustes son muy importantes ceñirlos bien para que el animal no pueda sacar la pata, sobre todo los gatos que tienen mayor elasticidad.

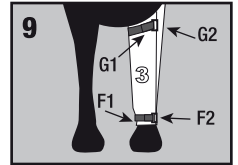

10.- Tras ponerle la prenda puede darle una recompensa por ejemplo comida (siguiendo las recomendaciones de su veterinario) para que lo asocie a algo positivo, de esta forma cada vez le resultará más fácil colocar la prenda.

11.- Permanezca un rato con su mascota, vigile y corrija si intenta quitársela antes de dejarlo sólo.

¿Tiene alguna duda?

Puede acceder a los videos de las instrucciones de colocación en:



O escribanos a ppv@prendasveterinarias.com

Queremos seguir mejorando. ¿Nos ayuda?

Nos gustaría saber cómo ha sido la experiencia de su mascota con la Prenda Protectora Veterinaria PPV. Qué le ocurría, qué tal se ha adaptado a la prenda, si le ha resultado cómoda, cuánto tiempo ha tardado en recuperarse...

Nuestra principal misión es ofrecer la mejor y más cómoda protección en esos momentos tan difíciles para las mascotas y sus dueños, por eso queremos seguir mejorando nuestros productos.

Entre en www.prendasveterinarias.com/experiencia o envíanos un e-mail a ppv@prendasveterinarias.com

