



Prendas Protectoras Veterinarias

Peto Protector para Macho cubre pecho y abdomen

Cubre y protege:

- Vendajes
- Apósitos
- Puntos de sutura
- Drenajes
- Pomadas
- Picaduras...



Gracias por adquirir este producto.

Con su compra, ha optado por un artículo de gran calidad y comodidad para su mascota que le ayudará en su recuperación.

Mantener las lesiones limpias puede ser muy difícil con mascotas que se hurgan, se tumban en el suelo o se rozan con cualquier superficie.

Las prendas PPT ayudan a que no se ensucien los apósitos y zonas a proteger.

Las prendas están confeccionadas con un textil técnico de nueva generación con las siguientes cualidades:

- **Propiedades antibacterianas** (limita la proliferación de bacterias) debido a su contenido de iones de plata en la composición de sus fibras.
- **Previene malos olores.**
- **Secado rápido.**
- **Ofrecen protección UV.**

Antes de utilizar la prenda, lea todas las indicaciones de uso y seguridad.


¿Por qué usar las Prendas Protectoras Veterinarias PPV?

Las Prendas Protectoras Veterinarias PPV son protecciones de alta calidad pensadas para la comodidad e higiene de los animales, por eso se componen de:

- Tejido técnico de última generación, elástico, antibacteriano, que deja salir la humedad, controla el olor y protege de los rayos UV.
- Hebillas o pasadores metálicos para evitar que sean mordidos.
- Correas para graduar la fijaciones situadas en lugares estratégicos para evitar que las prendas se muevan.
- Velcros flexibles y suaves para que no rocen.
- Todas la correas y el textil puede abrirse completamente para facilitar la colocación en cualquier caso veterinario.
- Su diseño patentado está pensado para que la mascota no pueda introducir el hocico por dentro de la prenda impidiendo el acceso a la zona afectada.

www.prendasveterinarias.com

ppv@prendasveterinarias.com

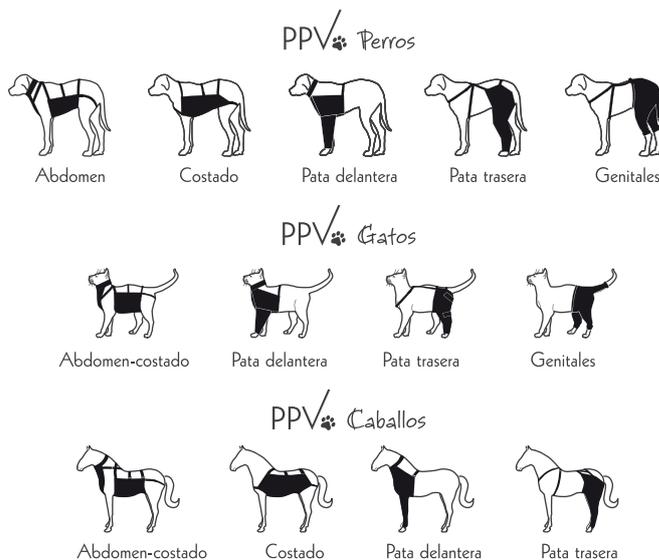


Uso correcto:

- 1.- Las Prendas Protectoras Veterinarias están destinadas a cubrir y proteger la zona que su mascota tenga dañada, de forma que no le permita acceder a ella para lamer, morder o arrancar puntos, vendajes, apósitos, vías, drenajes, cremas, etc. además de evitar que estas zonas se ensucien.
- 2.- Pueden estar en contacto directo con algunas lesiones, consulte a su veterinario en qué casos.
- 3.- Las prendas no curan por sí mismas, es necesario seguir las recomendaciones de su veterinario en cuanto a la cura de las lesiones.
- 4.- Antes de colocar la prenda calme y relaje a su mascota para una mejor experiencia por parte del animal, tenga en cuenta que cuando los animales heridos están incómodos, inquietos y estresados. Puede acariciarla, dejar que huelga la prenda...
- 5.- Tras seguir las instrucciones de colocación y comprobar que la prenda esté bien sujeta, es conveniente vigilar a la mascota hasta que se acostumbre a ella. Puede acariciarla, distraerla o darle su comida favorita según las recomendaciones de su veterinario.

- 6.- No apriete en exceso las sujeciones. Si éstas quedan demasiado justas es posible que necesite una talla más grande. Si lo desea póngan-se en contacto con nosotros y le ayudaremos en la mayor brevedad.
- 7.- Es normal que la mascota lama la tela de vez en cuando según el tipo de lesiones que se estén protegiendo. Consulte a su veterinario si observa que se lame demasiado o su comportamiento se vuelve obsesivo.
- 8.- Las prendas PPV son lavables a máquina a 40°, no obstante pueden desteñir. Lávelas preferiblemente solas (debido al pelo del animal que se haya podido adherir con el uso) o con prendas oscuras o del mismo tono.
- 9.- Si las lava a máquina cierre los velcros sobre sí mismos para conservar más tiempo la integridad la prenda.
- 10.- Para que los velcros no pierdan su adherencia puede quitar los pelos que se le hayan podido enredar con cinta adhesiva para que se peguen a su superficie.



Instrucciones de colocación:

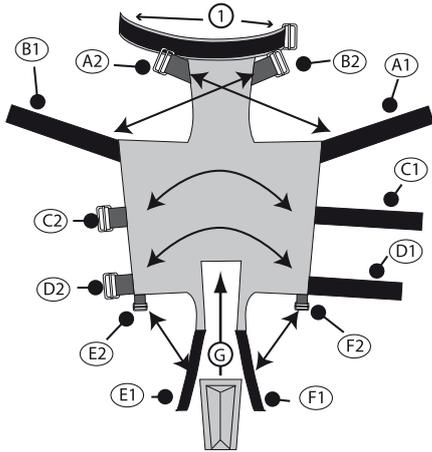


1.- Abra completamente los cierres y despegue los velcros.

2.- Puede dejar puesta o quitar la coquilla según sea necesario o no tapar los genitales.



2.- Es recomendable que el animal esté de pie y que para que permanezca inmóvil agarrarlo con las piernas sujetándolo por las caderas para que tenga sus manos libres.


3.- Si coloca la prenda por primera vez es posible que le resulte más fácil pasar las cintas por los pasadores de la forma en que se muestra en el dibujo "a" y "b" y cuando ya haya colocado la prenda por completo puede cerrarlas como muestra el dibujo "c" para maximizar la sujeción.

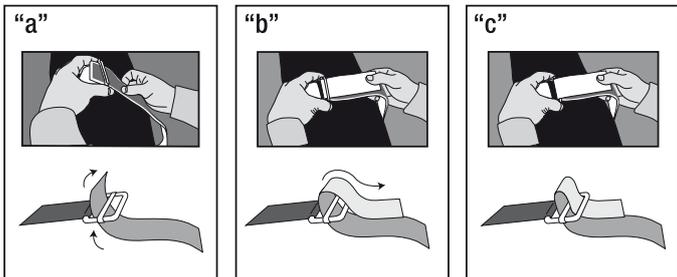


4.- Cierre los lados (1) alrededor del cuello.




5.- Pase el resto de la prenda por detrás de las patas delanteras, agarre una de las cintas A1, pásela sobre los hombros del animal y luego por el pasador A2 del lado contrario. Repita los pasos con la otra cinta B1 y el pasador de su lado opuesto B2.

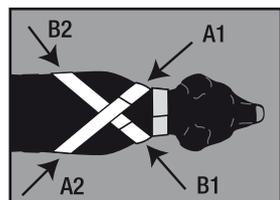

6.- Coja la cinta C1* que se encuentra a la altura del abdomen y ciérrela con el pasador de C2* que se encuentra al otro lado del abdomen. *Las cintas C1 y C2 no existen en la talla XS.

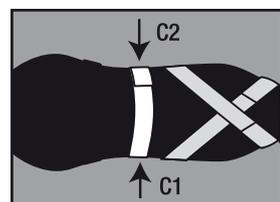



7.- Repita el mismo proceso con la cinta D1 cerrándola con el pasador D2 situados a la altura de la cintura.

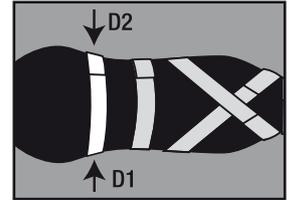

8.- Dese la vuelta sobre el animal para que le resulte más fácil poner las sujeciones a las patas traseras.



9.- Coja las cintas E1 y F1 y páselas bajo las patas traseras y ciérrelas con los pasadores E2 y F2 respectivamente.

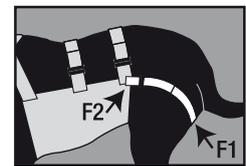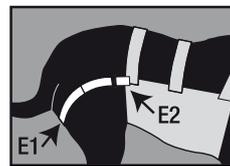

10.- Si lo desea una vez le haya puesto la prenda por primera vez no es necesario soltar las sujeciones de las patas traseras para quitar o poner la prenda.

11.- Tras ponerle la prenda puede darle una recompensa por ejemplo comida (siguiendo las recomendaciones de su veterinario) para que lo asocie a algo positivo, de esta forma cada vez le resultará más fácil colocar la prenda.

12.- Permanezca un rato con su mascota, vigile y corrija la si intenta quitársela antes de dejarlo sólo.

¿Tiene alguna duda?

Puede acceder a los videos de las instrucciones de colocación en:

Escríbanos a ppv@prendasveterinarias.com



Queremos seguir mejorando. ¿Nos ayuda?

Nos gustaría saber cómo ha sido la experiencia de su mascota con la Prenda Protectora Veterinaria PPV. Qué le ocurría, qué tal se ha adaptado a la prenda, si le ha resultado cómoda, cuánto tiempo ha tardado en recuperarse...

Nuestra principal misión es ofrecer la mejor y más cómoda protección en esos momentos tan difíciles para las mascotas y sus dueños, por eso queremos seguir mejorando nuestros productos.

Entre en www.prendasveterinarias.com/experiencia o envíenos un e-mail a ppv@prendasveterinarias.com

